

Respirátor (respiračná rúška) Improve FFP2 na 12 dní - červený

Obchod: Armik.sk

E-mail: info@netnakup.sk

Telefón: +420 720 278 200

Odkaz: <https://armik.sk/respirator-respiracna-ruska-improve-ffp2-na-12-dni-cervený/>



Kód tovaru: KN95M/RED

Značka: Improve

Veľkosť: XS, S, M, L

Popis:

Respiračná rúška je normy KN95, čo zodpovedá európskej triede ochrany FFP2 a americkej N95. Rúška je vhodná ako ochrana proti vírusom a baktériám - jedna rúška obsahuje 4 filtre FFP2! Každý filter vydrží po dobu troch dní, jedno balenie je teda na 12 dní. Cenovo je tak násobne výhodnejšie ako jednorazové respirátory.

Cena za 1 ks respirátora (na 12 dní). Veľkosť pre dospelých: M (menšia tvár) a L (väčšia tvár). Pre deti: XS (3-6 rokov), S (7-12 rokov). Dostupné len kompletne balenie rúška s filtrami, náhradné filtre sú bohužiaľ vypredané.

Certifikovaná respiračná rúška je normy KN95 (zodpovedajúcej triede ochrany FFP2). Ochranná norma KN95 je odporúčaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako minimálnym štandardom ochrany!

Certifikovaná európskou inštitúciou ISET Srl, certifikácia CE. Rúška s týmto ochranným filtrom zachytáva vírusy, aerosóly, prachové a smogové častice či peľ. Táto rúška triedy FFP2 zachytí až 98 % vírusov - bežné textilné či chirurgické rúška však nie! Splňa požiadavky NIOSH 42 CFR 84 N95 s filtračnou účinnosťou najmenej 95 %. TC-84A-4271. Vysoko kvalitné filtračné médiá s pokročilými staticky nabitými mikrovláknami pomáhajú uľahčiť výdych a nádych, čím zvyšujú pohodlie.

Služi ako ochrana pred vírusmi, hmlou, smogom, prachom, baktériami, znečistením ovzdušia, alergénmi a vlhkosťou.

Trieda ochrany: KN95 = N95 = FFP2

Miera filtrovania: $\geq 95-98\%$

Dátum výroby: 2020/03

Balenie obsahuje 4 filtre (každý filter je možné používať 3 dni). Jedno balenie vydrží teda 12 dní.

Správne nasadenie masky

Pred prvým použitím je nutná dôkladná hygiena rúk pomocou mydla a teplej vody. Po umytí rúk priložte vrchnú časť respirátora k tvári a následne pritlačte na tvár jeho spodnú časť. Keď respirátor dokonale prilne k vašej tvári, upravte elastické popruhy tak, aby ho udržiavali v bezpečnej polohe. Správne nasadená ochranná maska musí tesne doliehať k tvári a má zakrývať ústa, nos aj bradu. Muži by mali byť oholení, pretože brada môže spôsobiť netesnosť. Pri snímaní masky sa dotýkajte iba popruhov, nie časti, ktorá filtruje vzduch.

Dezinfekcia masky

Po použití odporúčame masku dezinfikovať.

Vyváranie: ide o jednu z najstarších ľudstvu známych metód sterilizácie, ktorá je navyše široko dostupná.

Dezinfekcia teplom: horúcou parou alebo v mikrovlnke (v prípade respirátorov bez kovových častí; podľa výkonu 3-5 minút; treba najprv navlhčiť vodou napríklad rozprašovačom; je nutné mať pod dohľadom, aby nedošlo k vzplanutiu).

Dezinfekcia UV žiarením: Kto má UV lampu, príp. takzvané horské slniečko, môže osvietiť z každej strany tri minúty.

Chemická dezinfekcia: Použiť vhodný dezinfekčný prostriedok, nechať uschnúť.

Pasterizácia: suchý ohrev pri teplote 60-70 ° C po dobu niekoľkých desiatok minút. Je potrebné dodržať uvedené teplotné rozmedzie, spodná hranica je dôležitá pre likvidáciu vírusu, horná zase znižuje riziko vznietenia materiálu.

Tento tovar nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť bez udania dôvodu v 14-dňovej lehote ani vrátiť k výmene veľkosti.

Min. trvanlivosť do: 18.3.2023

Výška a šírka masky je uvedená vo veľkostnej tabuľke nižšie. Všeobecne pre dospelých mužov je vhodná veľkosť L, pre dospelé ženy veľkosť M.

Parametre:

- Trieda ochrany: FFP2

VekVýška (cm)Šírka (cm)

Fotky:



ImproMask™ Plus

Zachytí až 95% virů | Určená pro každodenní nošení



+



x4

→



ImproMask™

ImproMask™ Filter

1 Mask + 4 Filters / Pack

Pratelná textilní rouška + 4 kusy vyměnitelných filtrů FFP2